


Cenefōm

セネフォームネーザルパッキング

Cenefōm NASAL PACKING

鼻や副鼻腔の手術、鼻出血の治療などにおいて、止血及び液体の吸収を目的に使用するPVA製スポンジです。毛羽や繊維を含まないPVA(ポリビニルアルコール)素材はオープンセル構造を持ち強度と柔らかさを併せ持つため、術後の出血や鼻出血の治療用途において、他の繊維状パッキング素材よりも優れています。

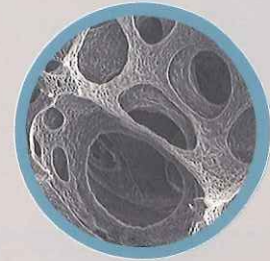

オープンセル構造
Interconnected
Pores



Soft when wet



High tensile strength

- 挿入と配置、除去が簡単
- 迅速に血液・唾液を吸収するためのソフトな圧迫
- 非繊維質の材料使用で、体内に残留物を残さない
- 柔らかく粘着性が低い低刺激性の素材
- ガンマ滅菌
- 異物混入を防止するために無菌室で包装管理

● 乾燥・圧縮処理した薄型の形状で挿入が簡単

● 迅速に膨張し、優しく圧迫して効果的に体液を吸収

● 出血や体液を吸収した後、柔らかく支持力を維持


特徴 Benefits

均一な気孔サイズとなめらかな表面構造は組織への固着を減らします。


使用方法



1 本品を滅菌袋から清潔に取り出して使用部位に挿入します。

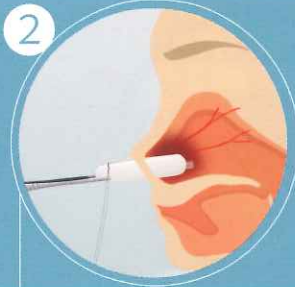

2 必要な場合、抗生物質の潤滑剤を本品の先端に塗布して挿入します。

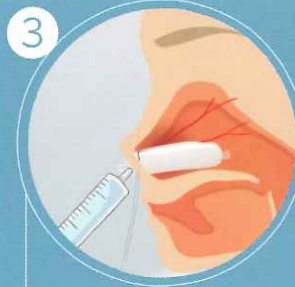


3 挿入した本品に生理食塩液又は蒸留水をシリンジで含ませます。



4 抜去する際は、本品に生理食塩液又は蒸留水を含ませ、放置後、鉗子を用いてゆっくりと抜去します。

品番・規格

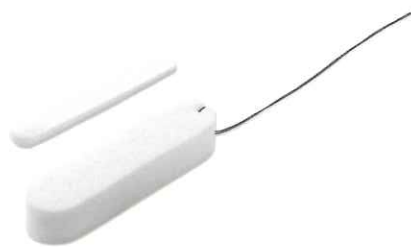

品番	規格 (L x W x H)		包装(箱)	JAN Code
NP-LS15S	45 x 20 x 15mm	系付き	20本	4580075049549
NP-LL15	80 x 20 x 15mm	系なし	20本	4580075049556
NP-EL15	100 x 25 x 15mm	系なし	10本	4580075049563

一般医療機器 [滅菌品] [単回使用]
販売名: セネフォームネーザルパッキング
届出番号: 27B2X00361000023

製造販売元
株式会社メディカルブリッジ
大阪市淀川区西中島6-3-32

Medical Bridge

販売元
株式会社京都医療設計
京都市山科区四ノ宮神田町4番地
TEL.(075)594-5595 FAX.(075)594-7858

KYOTO MEDICAL PLANNING